


BeneHeart C & S 系列除颤器

电池更换指南

此电池更换指南仅适用于 BeneHeart C & S 系列除颤器。

更换电池的步骤如下：

1. 翻转设备，使其背面朝上。
2. 卸下电池盖上的螺钉。
3. 用拇指沿图示方向将电池盖推开。

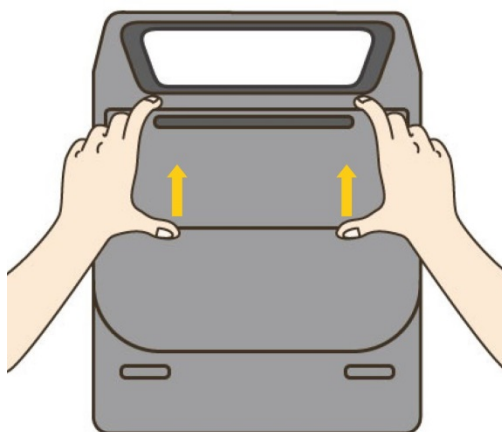

4. 用力按住电池末端的解锁按钮，同时向右滑动电池，将电池取出。



5. 对准要安装的新电池端子，将电池滑入电池仓内，直到听到电池卡到位的声音。
6. 装上电池盖，并且拧紧螺钉。
7. 如果更换电池的间隔超过 3 分钟，应按照设备的语音提示进行检测。

BeneHeart C & S Series AED

Battery Replacement Instructions

The following battery replacement instructions can be used for the BeneHeart C & S series AEDs only.

To replace the battery, follow this procedure.

1. Place the equipment on the worktable with face down.
2. Remove the screws from the battery door.
3. Remove the battery door as indicated.



4. Slide the battery to the left, and lift it to remove from the battery compartment.
5. Align the battery pins, slide the battery into the battery compartment until it clicks into place.
6. Re-install the battery door with the screws.



7. If you replace the battery after it is taken out for over three minutes, perform operations following the voice instructions.