



HyBase 3000

Операционный стол



mindray
healthcare within reach

HyBase 3000

Практичность, функциональность, универсальность и высокая надежность

Назначение кнопок пульта управления



Продольный сдвиг в сторону ножной секции на 100 мм



Продольный сдвиг в сторону головной секции на 200 мм



Подъем столешницы



Опускание столешницы



Положение Тренделенбурга



Обратное положение Тренделенбурга



Наклон влево



Наклон вправо



Подъем спинной секции



Опускание спинной секции



Изогнутое положение (Flex)



Изогнутое положение (Reflex)



Нулевое
положение «0»



Подъем головной секции



Опускание головной секции

Подъем и опускание ножной секции,
разведение 180°



Максимальная гибкость



Встроенный почечный валик для поясничного и грудного отделов



Сконструированный для хирургических процедур разной сложности операционный стол NuBase требует минимум усилий и времени для безопасного и удобного позиционирования пациента. Учитывая потребности хирургов и медицинских сестер, компания Mindray предлагает полнофункциональный операционный стол, обладающий следующими преимуществами:

- Противопрлежневый матрас для комфорта пациентов
- Безопасное и легкое позиционирование пациента в нужное положение
- Специальные функции для повышения эффективности



- Противопрлежневый антистатический и водонепроницаемый матрас, ультразвуковая склейка швов
- Электрогидравлический привод продольного сдвига столешницы до 300 мм для свободного доступа С-дуги
- Безопасная рабочая нагрузка в центральном положении 185 кг
- Заряда аккумулятора хватает на 50–80 операций
- Механическая тормозная система обеспечивает оптимальную устойчивость стола
- Возвращение стола в исходное положение нажатием одной кнопки
- Перевод стола в изогнутые положения (flex и reflex) нажатием одной кнопки
- Рентгенопрозрачные столешницы для свободного доступа С-дуги
- Три блока управления, включая пульт дистанционного управления, резервную панель на основании и ножной пульт управления.

Комплексное решение для операционной Mindray

Современные технологии и надежное оборудование Mindray обеспечат решение задач любой сложности.



HyBase 3000

Эффективное позиционирование пациента для любых видов хирургических вмешательств

Залогом успешной операции является правильное позиционирование пациента, обеспечивающее удобный доступ, превосходные результаты, экономию времени и эффективность. Универсальность стола HyBase 3000 в сочетании с различными принадлежностями позволяет быстро и надежно выполнить позиционирование пациента в любое положение.

При изготовлении операционных столов и принадлежностей используется высококачественная нержавеющая сталь. А для того, чтобы обеспечить полную функциональность при работе с С-дугой, все матрасы и столешницы выполнены из рентгенопрозрачных материалов. Для предотвращения риска повреждения критических областей тела Mindray предлагает гелевые аксессуары.



Положение при операциях на межпозвонковых дисках

Принадлежность:
115-005864-00 Подушка для головы при укладке на живот (280 x 240 x 140 мм)
0092-30-102639 Подушка для операций на межпозвонковых дисках (вискоэластичный материал с эффектом памяти, 1 шт.)
0092-30-102634 Опора для рук



Положение при ректальных операциях

Принадлежность:
115-007049-00 Устройство для позиционирования при ректальных операциях
115-005864-00 Подушка для головы при укладке на живот (280 x 240 x 140 мм)
0092-30-102640 Ремень для фиксации, 1 шт.
0092-30-102634 Опора для рук



Обычное положение при операциях на щитовидной железе



Положение при офтальмологических операциях

Принадлежность:
115-007045-00 Секция для офтальмологических операций
115-005857-00 Гелевый подголовник (200 x 70 x 50 мм)
0092-30-102642 Адаптер для нейрохирургического подголовника



Положение при операциях на кисти или руке

Принадлежность:
115-007047-00 Стол для операций на руке
115-005873-00 Гелевый подголовник (200 x 70 x 50 мм)



Стандартное положение пациента на спине с продольным сдвигом в сторону головной секции на 200 мм

Принадлежность:
115-005873-00 Гелевый подголовник (200 x 70 x 50 мм)



Положение при нейрохирургических операциях

Принадлежность:
115-005695-00 Регулируемый подголовник подковообразной формы
0092-30-10264 Адаптер для нейрохирургического подголовника



Нейрохирургический адаптер совместим с аксессуарами Mayfield

Принадлежность:
0092-30-102642 Адаптер для нейрохирургического подголовника

Примечание: Все приведенные типы укладок являются примерами и не представляют медицинской точки зрения.

HyBase 3000

Удобное позиционирование пациента для всех видов хирургических вмешательств

Разработанные в тесном сотрудничестве с конечными пользователями, эти принадлежности обеспечивают все необходимые потребности при позиционировании для выполнения хирургических операций, позволяя располагать пациентов оптимальным способом как для хирургов, так и самих пациентов.



Литотомическое положение для гинекологических и урологических операций

Принадлежность:
115-007043-00 Ремни в форме петель для ног с легким универсальным зажимом с круглым отверстием, 1 шт.
115-005697-00 Дренажный таз для гинекологических и урологических операций



Литотомическое положение

Принадлежность:
0092-30-102635 Опора для ноги типа «Гоппель», усиленное исполнение, 1 шт., с усиленным универсальным с круглым отверстием, 1 шт., подушкой, ремнем для фиксации, 1 шт.
115-005697-00 Дренажный таз для гинекологических и урологических операций



Латеральное положение для минимально инвазивных хирургических операций

Легкое позиционирование пациента для минимально инвазивных хирургических операций с помощью встроенного почечного валика с подъемом на 120 мм



Латеральное положение для минимально инвазивных хирургических операций

Принадлежность:
0092-30-102634 Опора для руки
0092-30-102648 Опора для руки при укладке на бок
0092-30-102638 Большая опора для тела
0092-30-102669 Малая опора для тела
115-005873-00 Гелевый подголовник (200 x 70 x 50 мм)
115-005811-00 Подушки для рук и ног при укладке на бок (500 x 150 x 40 мм)
0092-30-10263 Опора для рук



Положение при операциях на бедренной кости

Принадлежность:
115-009425-00 Ортопедическая секция для вытяжения с транспортной тележкой



Положение пациента на боку при операциях на бедренной кости

Принадлежность:
115-007057-00 Секция для вытяжения бедра в положении на боку
115-009425-00 Секция для ортопедии и травматологии



Положение при операциях на большеберцовой кости

Принадлежность:
115-007055-00 Секция для вытяжения голени
115-009425-00 Секция для ортопедии и травматологии



Положение при операциях на большеберцовой кости

Принадлежность:
115-007055-00 Секция для вытяжения голени
115-009425-00 Секция для ортопедии и травматологии



Операции на шейке бедра


Принадлежность:
115-007055-00 Секция для вытяжения голени
115-009425-00 Секция для ортопедии и травматологии

HyBase 3000

Надежное решение от компании Mindray



Благодаря противолежневому вискоэластичному матрасу из материала SFC (Special Foam Core – специальный вспененный наполнитель) обеспечивается оптимальное распределение давления на ткани пациента, что в значительной степени устраняет нарушения микроциркуляции в тканях – основную причину образования пролежней, и сокращает вероятность послеоперационных осложнений, ускоряя выздоровление пациентов.

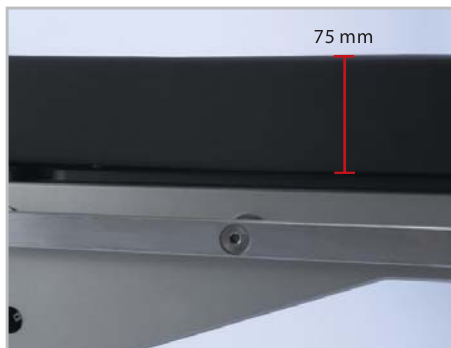

Благодаря вискоэластичному матрасу толщиной 75 мм из двухслойного материала обеспечивается непревзойденный комфорт для пациента.



Материал GORE-TEX является воздухопроницаемым, водонепроницаемым, огнестойким, антистатичным и соответствует гигиеническим требованиям.



Поскольку обычные матрасы с большим трудом чистятся, задача удаления пятен крови и физиологических жидкостей, несущих скрытую опасность для здоровья хирургов и пациентов, становится серьезной проблемой. Благодаря использованию современных технологий ультразвуковой склейки, водонепроницаемые матрасы не причиняют такого беспокойства.



Педаля для механической фиксации обеспечивает максимальную безопасность и стабильность при простоте использования.



Функции резервной панели управления

- Продольный сдвиг*
- Подъем/опускание
- Положение Тренделенбурга
- Обратное положение Тренделенбурга
- Наклон влево/вправо
- Подъем/опускание спинной секции

*Опция


Заряда аккумулятора хватает на 50–80 операций. Существует резервная панель управления на случай поломки ручного пульта.

HyBase 3000


Универсальный электрогидравлический операционный стол

Технические характеристики


Размеры	
Полная длина	2060 мм
Высота без матраса	720–1070 мм
Ширина без боковых рельсов	520 мм
Ширина с боковыми рельсами	590 мм

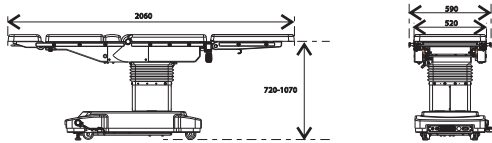


Положение Тренделенбурга	
Положение Тренделенбурга	Макс. 30°
Обратное положение Тренделенбурга	Макс. 30°

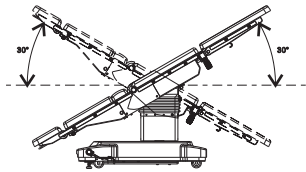


Ножные секции	
Угол подъема	Макс. 20°
Угол опускания	Макс. 90°

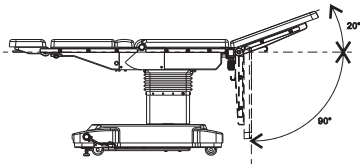


Изогнутое положение (Reflex)	
Reflex	110°
Положение Тренделенбурга	25°
Точки крепления подняты	45°

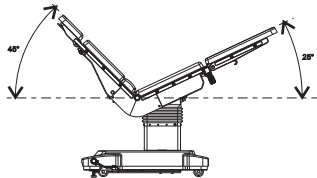


Продольный сдвиг (опция)	
Сдвиг к голове	Макс. 200 мм
Сдвиг к ногам	Макс. 100 мм

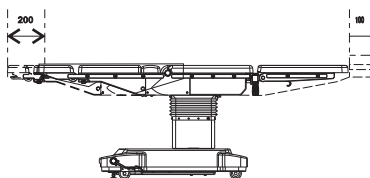


Боковой наклон	
Угол наклона влево	Макс. 25°
Угол наклона вправо	Макс. 25°

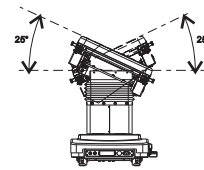


Спинальная секция	
Подъем спинной секции	Макс. 80°
Опускание спинной секции	Макс. 40°

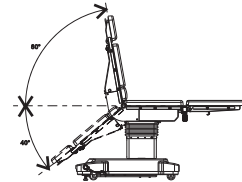


Головная секция	
Подъем головной секции	Макс. 45°
Опускание головной секции	Макс. 90°

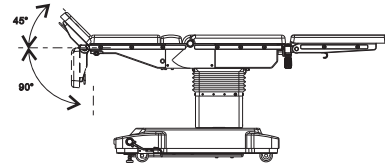

Изогнутое положение (Flex)	
Изогнутое положение (Flex)	220°
Обратное положение Тренделенбурга	20°
Точки крепления опущены	20°

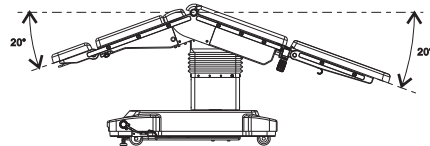

Почечный валик (опция)	
Высота подъема	Макс. 120 мм

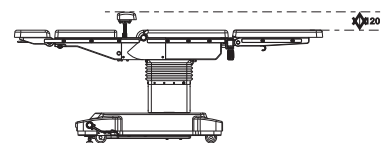

HyBase 3000

Универсальный электрогидравлический операционный стол

Материалы и информация, представленные в данной брошюре, распространяются на международных рынках, однако не все продукты доступны в стране вашего местонахождения. Пожалуйста, свяжитесь с представителем или партнерами для того, чтобы уточнить возможность поставки товаров или предоставления услуг.

Mindray Medical Netherlands B.V.

Drs.W.van Royenstraat 8, 3871 AN Hoevelaken, The Netherlands
Voice: (31-33) 254-4911
Fax: (31-33) 253-4280

Mindray Medical Italy S.r.l.

Via Leonardo DA Vinci, 158, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy
Voice: (39-02) 5737-401
Fax: (39-02) 5523-2018

MindrayMedicalEspaña S.L.

Avenida Manoteras 38, Edificio B, Bajo B008. 28050-Madrid Spain
Voice: (34-91) 392-3754
Fax: (34-91) 392-3756

Mindray Medical Germany GmbH

Zwischen den Bächen 4, 64625 Bensheim, Germany
Voice: (49) 6251-17524-0
Fax: (49) 6251-17524-20

Mindray (UK) Limited

3 Percy Road, St. Johns Park, Huntingdon, Cambs,
PE29 6SZ United Kingdom
Voice: (44) 1480-416-840
Fax: (44) 1480-436-588

Mindray Medical France SARL

Europarc Creteil 1 allée des cerisiers 94000 CRETEIL, France
Voice: (33-1) 4513-9150
Fax: (33-1) 4513-9151

Mindray Medical Sweden AB

Rissneleden 136, 174 57 Sundbyberg, Sweden
Voice: (46) 8 555 54 121
Fax: (46) 8 555 54 101

Mindray Medical Rus Co.Ltd

Olimpiyskiy Prospekt 16, bld 5, 129110, Moscow, Russia
Voice: (7-499) 553-6036
Fax: (7-499) 553-6039

Mindray Medical Colombia S.A.S

Room No.702, Torre UNIKA, Carrera 9 No.77-67, Bogota, Colombia
Voice: (57-1) 3130892 / 3210916

Mindray do Brasil - Comércio e Distribuição de Equipamentos Médicos Ltda.

Rua Tavares Bastos, 329, Perdizes, São Paulo - SP,
CEP 05012-020
Voice: (55-11) 3124-8026
Fax: (55-11) 3078-8035

Mindray Medical Mexico S. de R.L. de C.V.

Félix Parra # 175 Colonia. San José Insurgentes Sur Delegación Benito Juárez 03900 México, D. F.
Voice: (52-55) 5661-9450 / (52-55) 5662-6620
Fax: (52-55) 5662-6597

PT. Mindray Medical Indonesia

The East 11th Floor, Unit 08 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 3.2 No.1 Jakarta 12950
Voice: (6221) 2902-7280
Fax: (6221) 2902-7283

Mindray Medical Egypt

Ground Floor -11 El Imam Metwally El Sharawy Street,
Sheraton Heligopolis - El Nozha, Cairo, Egypt
Voice: (2) 02 22691047
Fax: (2) 02 22691046

Mindray Medical India Pvt. Ltd. (Delhi Office)

16th floor, Building No. 9-B, DLF Cyber City, DLF Phase-3,
Gurgaon- 122002, Haryana
Voice: (91-124) 4632-488
Fax: (91-124) 4632499

Mindray Medical India Pvt. Ltd. (Mumbai office)

B-404, City Point, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai,
400 059, India
Voice: (91-22) 4020-0000
Fax: (91-22) 4020-0011

Mindray Medikal Teknoloji Istanbul Ltd. Sti.

KOYALTI MEVKİL 29 EKİM CAD.N.1 KUYUMCUKENT 2.NO.PLZ.3.KT.
D.1- 9 34520 BAĞÇELİEVLER/YENİBOSNA, İSTANBUL, TÜRKİYE
Voice: (90-212) 482 08 77
Fax: (90-212) 482 08 78

Mindray Medikal Teknoloji Istanbul Ltd. Sti. Branch Office Ankara


TURAN GÜNEŞ BULVARI ALEKSANDER DÜBÇEK CAD. NO:18/A
ÇANKAYA/ANKARA, TÜRKİYE
Voice: (90-312) 441 96 92
Fax: (90-312) 441 96 93

Mindray Medical Vietnam Co., Ltd.

Unit 2, 4th Floor, "B" Building, Broadway Office Park,
102 Nguyen Luong Bang Blvd., Tan Phu Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam
Voice: (84) 8 5413-6970
Fax: (84) 8 5413-6971

Mindray Medical Thailand Limited

1768 Thai summit Tower Room 407, 4th floor, New petchaburee Road,
Kwaeng Bangkok, Khet Huai Khwang, Bangkok 10320, Thailand
Voice: (66) 2652-7288
Fax: (66) 2652-7266

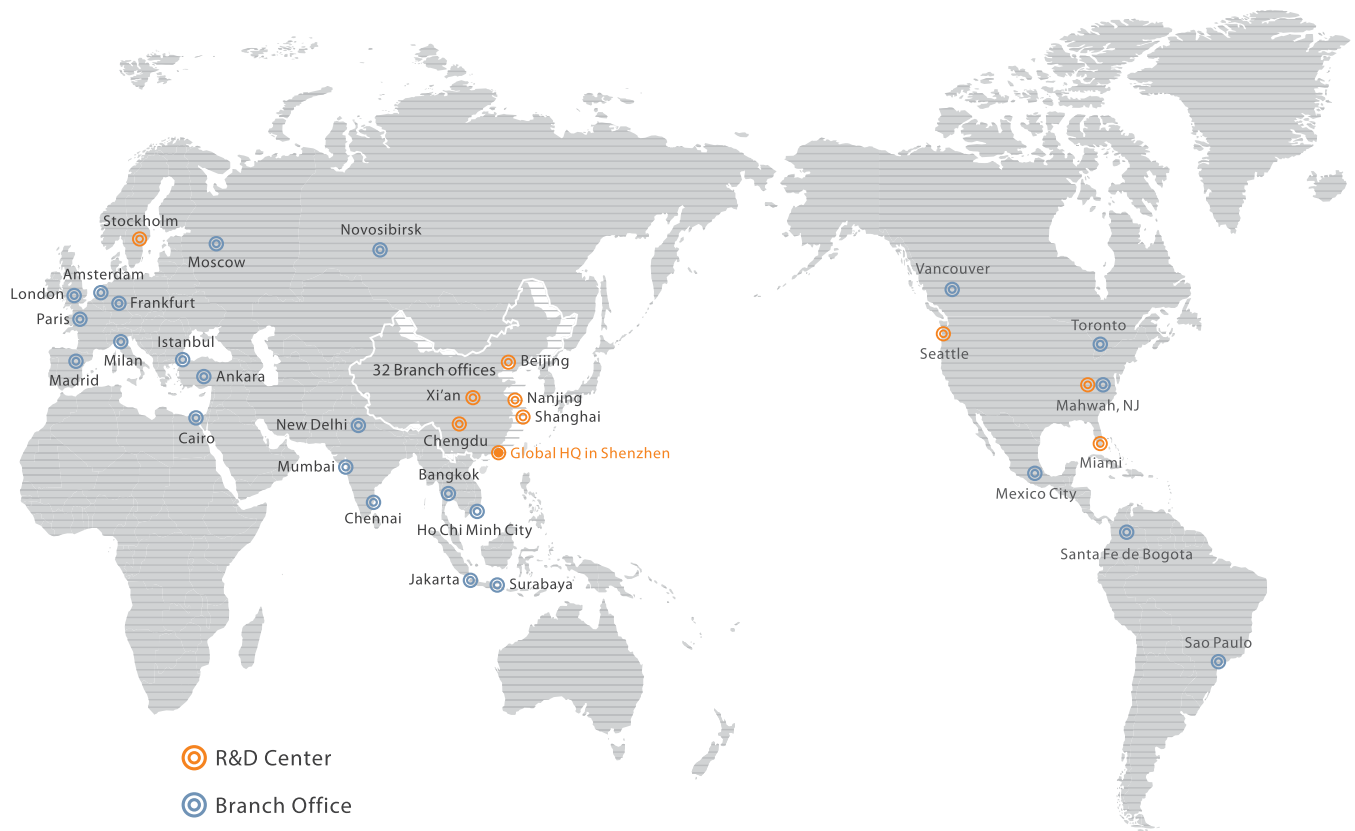

📍 R&D Center

📍 Branch Office

mindray

healthcare within reach

ООО МИНДРЕЙ МЕДИКАЛ РУС

129110, Москва, Олимпийский проспект, 16, стр. 5
Тел.: +7 499 553 60 36 Факс: +7 499 553 60 39

Телефон технической поддержки пользователей
8-800-333-53-23 (звонок по России бесплатный)

www.mindray.com



mindray зарегистрированный товарный знак, принадлежащий компании Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., LTD.

© 2014 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Все права защищены. № документа: ENG-HyBase I003000-201111019